

CHANSON®
more than just water



H2 PURE INHALE 300

MOLEKYLÆR HYDROGEN INHALATOR

- din guide til den bedste start og vedligeholdelse

Tillykke

DU ER NU EJER AF EN H2 PURE INHALE

Chanson er førende på verdensmarkedet indenfor ioniserings- og filterteknologi med over 40 års erfaring i fremstilling af sikre helseprodukter. Tusindvis af timers research, testning og udvikling har ført til denne maskine, som du nu står med idag.

Jeg hørte om H2 første gang i 2014 i forbindelse med min mands nyresygdom. Han var dialyse patient, og jeg læste at man i Japan havde haft succes med at komme hydrogen rigt vand i dialysevæsken så kroppen bedre kunne rense sig. Min nyeste opdagelse er at H2 også kan inhaleres hvor man virkelig kan give kroppen et effektivt boost.


DE KÆRLIGSTE HILSNER



PRODUKT BESKRIVELSE

FORSIDE

- A. Låg til vandtank
- B. Vand level indikator
- C. Start-knap
- D. Brint - inhaleringslange

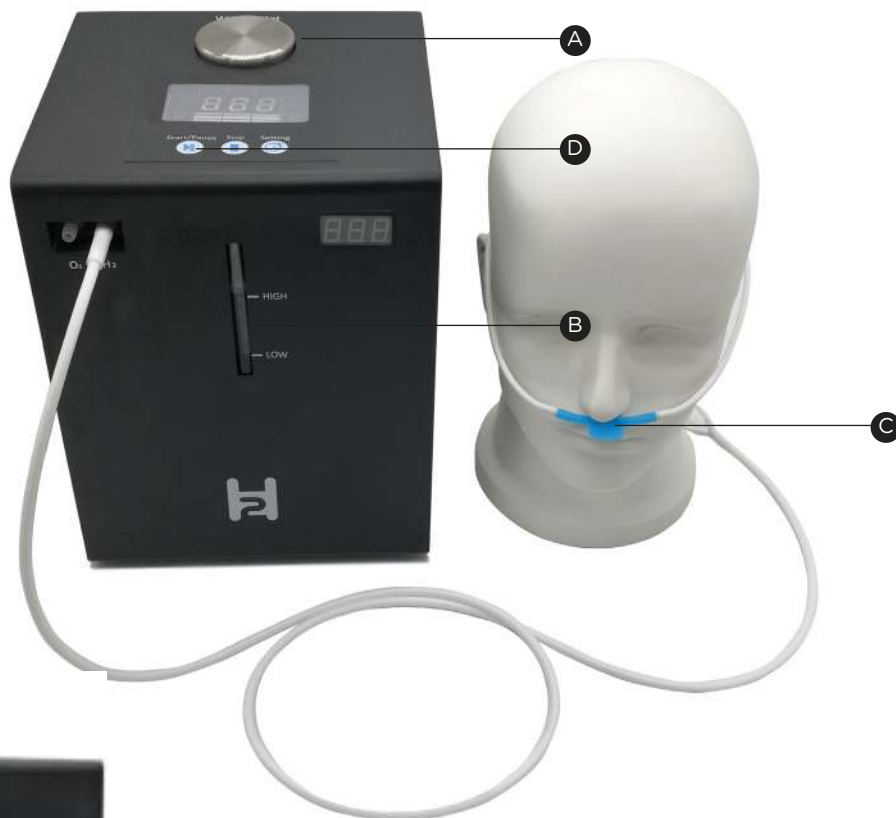

BAGSIDE

- A. Vand dræner
- B. Trykaflastningsudløb
- C. Start-knap
- D. Vand dræner - slange



PRODUKT BESKRIVELSE

INSTALLATIONSSÆT



A. Hydrogen inhalator - H2 Pure Inhale

B. Strømkabel

C. Adapter

D. Inhaleringslange/nasalslange

E. Vand dræner

SÅDAN GØR DU...

DAGLIGT BRUG

- A** Skru låget af tanken og hæld 1,5 l. demineraliseret vand med TDS u. 10 i maskinen indtil vandniveauet er mellem de to sorte vand indikatorer som ses på maskinens front. Hvis vandstanden i vandtanken er for lavt eller for højt vil maskinen lyse rød.
- B** Indstil arbejdstid: Tryk på indstillingsknappen en gang, arbejdstiden tilføjes 10 minutter, maksimum er 180 minutter.
- C** Indstil brintgennemstrømningshastighed: Der er 3 tilstande (lav, medium og høj) af brintgennemstrømning, lav er 110 ± 10 ml/min, medium er 210 ± 10 ml/min, høj er 310 ± 10 ml/min, standardtilstand er høj. Bliv ved med at trykke på indstillingsknappen i 3 sekunder for at justere tilstanden. Standardtilstand er høj.
- D** Fjern begge beskyttelsesdækslet på H₂- & O₂stikkontakten, klik på Start/Pause-knappen, maskinen begynder at generere brint, indikatorlampen for brintproduktion lyser, brintstrømningsindikatoren stiger, indtil den maksimale strømning er nået; Klik på ON / PAUSE igen for at PAUSE maskinen; Når timeren er færdig med at tælle ned, vender maskinen tilbage til standbytilstand
- E** Tilslut nasalslange til brint- og iltudløbet for at inhalere; Hvis du stopper iltudgangen ved hjælp af stikket, udledes iltgassen fra trykaflastningsudgangen bag på maskinen.

EFTER 20 TIMERS BRUG

Efter 20 timers brug skal vandet skiftes.

- A** Tøm maskinen for det brugte vand.
- B** Skyld maskinen ved at fylde maskinen med 1,5 l. demineraliseret vand - tøm igen.
- C** Fyld maskinen med 1,5 l. demineraliseret vand.

At skifte vandet regelmæssigt er godt for maskinen. Hvis maskinen ikke skal bruges over en længere periode, bør du efterlade maskinen med destilleret vand.

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Virker ikke - ingen lys i display	<ul style="list-style-type: none">- Strømkabel ikke korrekt monteret- Power adapter beskadiget	<ul style="list-style-type: none">- Sæt strømstikket korrekt i maskinen- Udskift power adapter
Der kommer ingen H2	<ul style="list-style-type: none">- For lidt vand- Gammelt vand- Lækage i generator eller i slangen	<ul style="list-style-type: none">- Hæld mere destilleret vand i maskinen- Skift vandet- Tætning af lægager
Rødt lys	<ul style="list-style-type: none">- For lidt vand- TDS niveauet er for højt	<ul style="list-style-type: none">- Tilføj maskinen mere vand- Skift vandet med nyt destilleret vand
Der kommer vand ud af H2 udtaget	<ul style="list-style-type: none">- Maskinen trænger til at blive nedkølet- Defekt damp separator	<ul style="list-style-type: none">- Sluk maskinen indtil nedkøles- Skift damp separator
Der kommer vand i næsen	<ul style="list-style-type: none">- Den grønne dampseparator er fyldt	<ul style="list-style-type: none">- Den grønne dampseparator skal tømmes for vanddamp

SPECIFIKATIONER

PRODUKT SPECIFIKATIONER

PRODUKT NAVN	H2 PURE INHALE - 300
Power	100-220V±10% 50Hz--60Hz
Vægt	1,6 kg.
Kapacitet i vand tank	1,5 L.
Trykstabilitet	<0.001 Mpa
Hydrogen MAX output	150 ml/min
Oxygen MAX output	75 ml/min
Strømforbrug	80 Watt
Vand kvalitet	Burger KUN demineraliseret vand m. TDS u. 10

SUPPLERENDE PRODUKTER

...FÅ RENERE VAND, NEMMERE RENGØRING OG MEGET MERE

Om det er et nyt filter til ioniseringsmaskinen, produkter til vedligehold eller måske renere vand, du ønsker, så finder du alle produkterne i vores webshop på www.chanson.dk.

Herunder ser du et udvalg af de af vores produkter, som er de mest populære supplementer til vores ioniseringsmaskiner. Du finder dem i vores webshop under samme kategorier - her vil du også kunne læse yderligere information om hvert enkelt produkt.

IONISERINGSMASKIER



MINI IONIZER

Med Mini Ionizer On The Go, kan du nemt og hurtigt lave ioniseret, basisk vand, som er nærende og fyldt med antioxidanter - hvor som helst og når som helst



CHANSON MAX PLUS

Ioniseringsmaskine producerer ioniseret basisk vand med antioxidanter og renser dit drikkevand for pesticider. Chanson Max Plus kan levere pH-værdi fra stærk syrevand pH 2,5 op til stærkt basisk vand pH 10,8. t mere effektiv.



CHANSON ROYALE

Ioniseringsmaskine producerer ioniseret basisk vand med antioxidanter og renser dit drikkevand for pesticider. Chanson Royale kan levere pH-værdi fra stærk syrevand pH 2,5 op til stærkt basisk vand pH 10,8.

AFKALKNING, DESINFIKTION OG BRUSEFILTER



DESINFIKTIONSSPRAY

Hypoklorsyre betragtes som et naturligt og hudvenligt universalrengøringsmiddel, desinfektionsmiddel og lugtfjerner der erstatter blegemiddel, kemisk fremstillede lugtfjerner.



AFKALKNINGSPULVER

Miljøvenlig, effektiv afkalker - fjerner kalk, mineraler & holder titaniumspladerne fri for kalk. Sikre en frisk samt smags- og lugtfri maskine



BRUSEFILTER

Fjerner resterende klor i badevandet og sænker pH-værdien, så den passer til hudens egen pH. Plejer huden og giver blødt hår uden brug af balsam.



MOSEL FILTERKANDE

Mosel filterkanden er den første af en helt ny generation af filterkander som benytter sig af 5 filtrerings teknologier. Filteret kombinerer tusind år gammel viden om brug af kul & med moderne teknologi



MINI IONIZER TI 2.0

Med Mini Ionizer TI 2.0, kan du nemt og hurtigt lave ioniseret basisk vand, som er nærende og fyldt med antioxidanter - hvor som helst og når som helst



DAFI FILTERKANDE

Få renere vand med mindre kalk, færre tungmetaller og klor ved at lade dit drikkevand fra hanen løbe igennem filtret i glaskanden. Dafi kanden er et alternativ til dig, der udelukkende ønsker drikkevand med mindre kalk og tungmetaller.

ERSTATNINGSFILTRE OG RENSNINGSSYSTEMER



KUL FILTRERING

Dette filter bruger avancerede teknologier til at rense dit drikkevand for pesticider og tungmetaller. Filtreren filtrerer kun de skadelige stoffer fra og bibeholder de vigtige mineraler og den gode smag i dit drikkevand.



FILTRERET POSTEVAND

Med en separat hane til at filtrere dit drikkevand, kan du med Chansons forskellige vandfiltre rense dit drikkevand, alt efter dit behov.



ALKALINE STAV

Med en Alkaline stav kan du hæve pH værdien i postevandet til 8-9.5 pH. Læg Alkaline staven ned i en flaske og efter 15- 20 min. kan du nyde basisk, ioniseret vand

SKØNHED & HUDPLEJE



HYDROGEN FACE MIST

Til dig som ønsker at holde huden ung og støtte huden til optimal hydrering. Med Iwater facemisen forstås huden med hydrogen molekyler som har antioxidant effekt.



ION BØRSTER

Med en ion børste vil du skabe energifyldte negative ioner i hud og lymfesystem. Resultatet er mere energi bedre væske cirkulation og smukkere hud.




FACE MIST FLASKER

Face mist flasker - 100 ml. til at opbevare dit syrevand i til daglig pleje af huden og hudproblematikker

VI VISER DIG, HVORDAN DU SKAL GØRE...

FIND VEJLEDNINGER OG VIDEOER PÅ

WWW.CHANSON.DK/PRODUKTVIDEOER

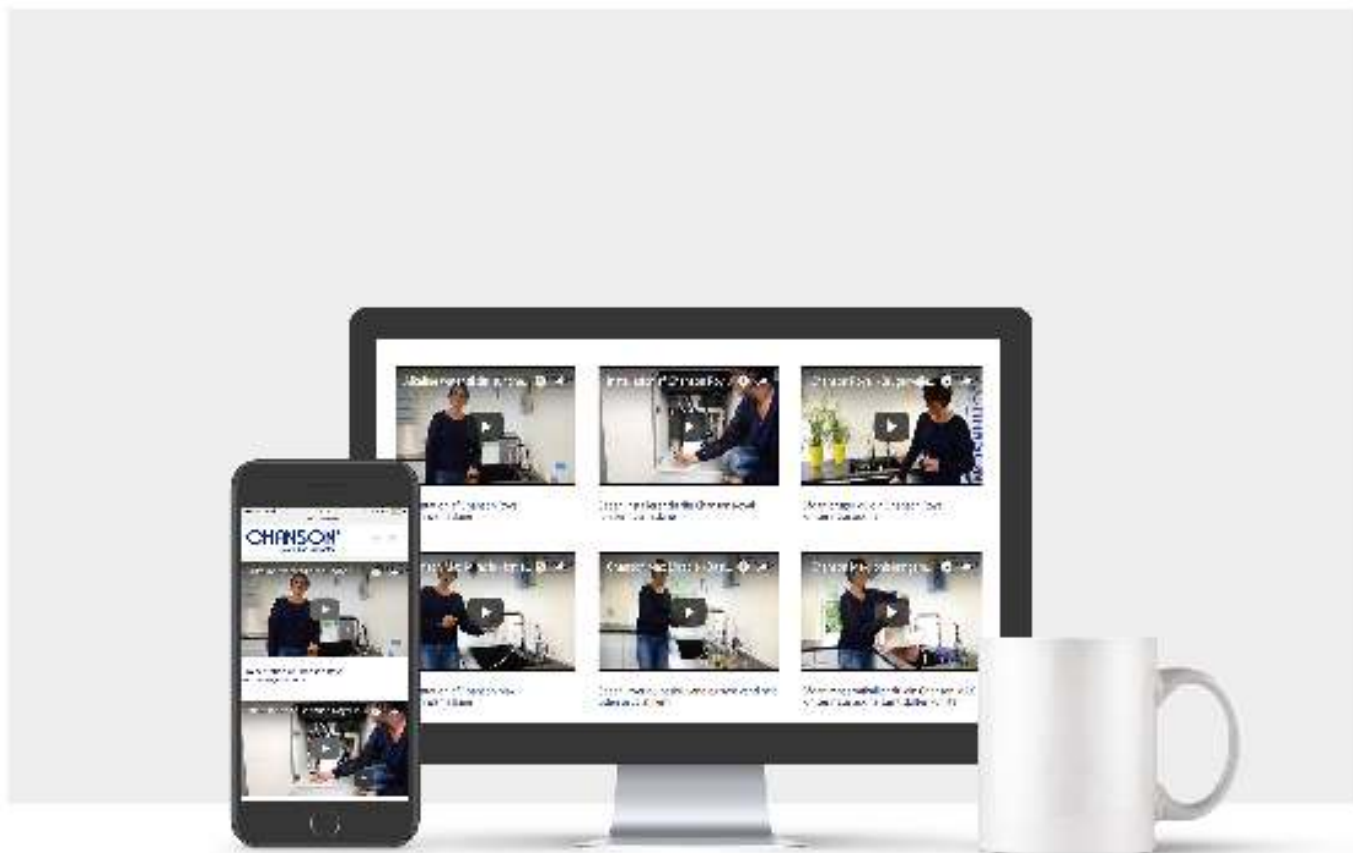

CHANSON[®]
more than just water



WWW.CHANSON.DK



CHANSON DANMARK



CHANSON DANMARK



CHANSONDANMARK